

LX 9

Dispositivo per pressomassaggio

AROSHA LX9 è un dispositivo di alta qualità, semplice, portatile dal design compatto con programmi efficaci per il drenaggio linfatico, la stimolazione del circolo o il massaggio muscolare. Il funzionamento di massima consiste nel gonfiaggio con aria, da parte del corpo centrale del device, di 4 camere accessorie: cuffia gambe, cuffia braccia, cuffia fianchi, cuffia busto.



FUNZIONE

- Strumento portatile
- Di facile installazione e programmazione
- Semplice utilizzo



CARATTERISTICHE

- 4 programmi a scelta
- Range di pressione: 20-200 mmHg
- Range di settaggio tempi: 5 - 90 minuti
- Tempi di attesa: 0 - 6 secondi



DOTAZIONE

- 1 macchinario
- 2 cuffie gambe con 4 camere
- 1 cuffia fianchi con 4 camere
- 1 tubo con uscita singola
- 1 tubo ad uscita doppia
- 1 splitter flessibile



OPTIONAL

- Cuffia busto con 4 camere
- Cuffia braccia con 4 camere
- Estensione per cuffia braccia
- Estensione per cuffia gamba



2 Gambali



Cintura addominale



Tuta addominale



Accessorio per il braccio

INFO

Dimensioni dell'apparecchiatura: 26x16x120 cm

Peso: 2 Kg

Prodotto certificato CE

Leggere il manuale di istruzioni per tutte le informazioni.

PROTOCOLLI D'USO AROSHA LX9

Casi clinici	Durata della sessione	Selezione modalità	Pressione (mmHg)	Velocità	Accessorio suggerito
Cellulite fibrosa	30-35 min	B	60~130mmHg	3	Drainage set o tuta addominale
Cellulite edematosa	40 min	B	60~130mmHg	3	Drainage set o accessorio braccia
Adiposità	30-35 min	B	60~130mmHg	3	Drainage set o tuta addominale
Drenaggio linfatico completo	35-40 min	B	30~60mmHg	3	Drainage set
Drenaggio linfatico parziale	30 min	B	30~60mmHg	3	Gambale o accessorio braccia
Detossificazione	30 min	B	40~80mmHg	3	Drainage set o accessorio braccia
Miglioramento circolazione	30 min	C	40~80mmHg	3-4	Drainage set o accessorio braccia
Pelle elastica	30 min	C	40~80mmHg	3-4	Gambale o drainage set o accessorio braccia
Antistress	20-25 min	C	30~80mmHg	3-5	Gambale o drainage set
Massaggio	30 min	A	60~130mmHg	2	Gambale o drainage set o accessorio braccia
Piedi e mani fredde	25-30 min	A	40~100mmHg	3-4	Gambale o accessorio braccia
Effetto esercizi	20 min	A	60~100mmHg	3-4	Gambale o drainage set
Assetto zona pelvica	30 min	D	80~120mmHg	3	Drainage set

Aggiungere la benda Arosha nel protocollo significa fornire attivi mirati per ottenere risultati ancora migliori a lungo termine e in tempi più brevi.